


Goman S.r.l. - Via Maestri del lavoro, 8 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy Tel. +39 0376 671780 - Fax +39 0376 671286 www.goman.it - e-mail: info@goman.it



SCHEDA TECNICA D0510 - D0511

Parete attrezzata h 60cm., con miscelatore termostatico (solo per cod. D0510), per collocazione webidet, in modo da raggiungere la distanza idonea per l'avvicinamento della seggiola a rotelle, completa di : struttura in acciaio zincato per il fissaggio we a parete, rivestimento in ABS termoformato non ignifugo, vaso sospeso con apertura frontale per funzione bidet, tubo flessibile di scarico Ø100.

Solo per D0510: miscelatore termostatico a parete, doccetta a pulsante con flessibile.

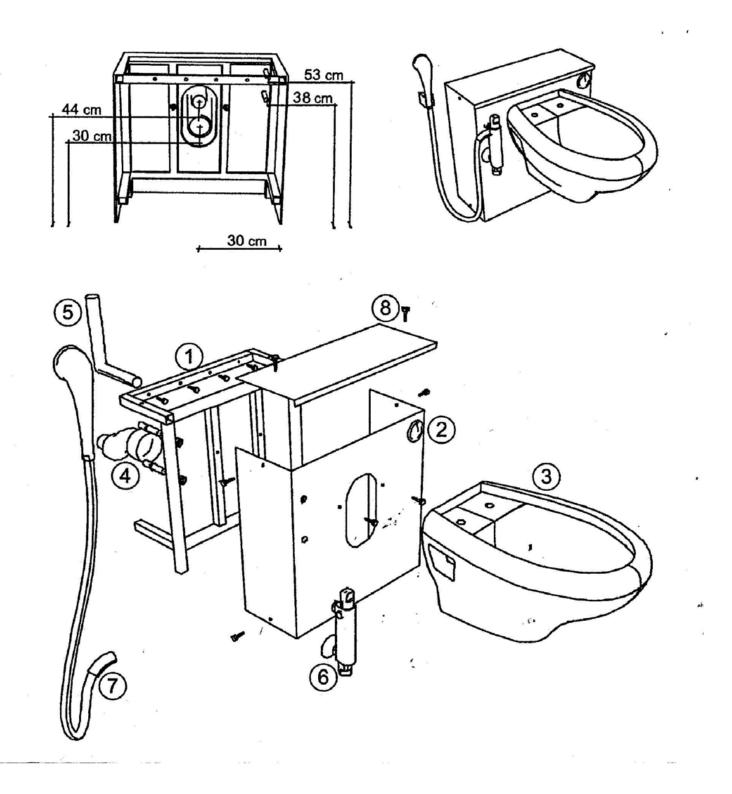


D0510 - D0511 01/01/05 Pag. 1-2



Goman S.r.l. - Via Maestri del lavoro, 8 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy Tel. +39 0376 671780 - Fax +39 0376 671286 www.goman.it - e-mail: info@goman.it



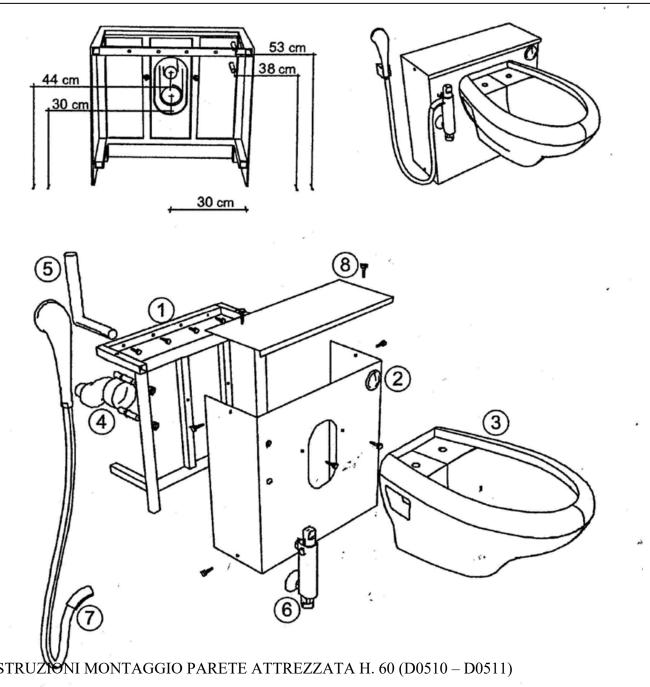

- 1. Fissare al muro la struttura portante inferiore posizionandola a terra e utilizzare viti/sistemi di fissaggio (non forniti) appropriati al tipo di parete.
- 2. Inserire la copertura e avvitarla alla struttura con le apposite viti fornite autofilettanti.
- 3. Ancorare il vaso sospeso alla struttura servendosi dei tiranti Ø10 contenuti nella confezione.
- 4. Collegare il tubo flessibile di scarico al vaso sospeso.
- 5. Collegare il condotto dell'acqua al vaso.
- 6. Montare il miscelatore termostatico sulla struttura portante con le riduzioni fornite (in caso di pareti senza miscelatore coprire i fori con gli appositi tappi in dotazione).
- 7. Avvitare il supporto della doccetta nella posizione desiderata.
- 8. Inserire il coperchio superiore e avvitarlo alla struttura portante con le apposite viti autofilettanti.