


Goman S.r.l. - Via Maestri del lavoro, 8 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy Tel. +39 0376 671780 - Fax +39 0376 671286 www.goman.it - e-mail: info@goman.it



## SCHEDA TECNICA D0512 – D0513


Parete attrezzata h 60 cm., con miscelatore termostatico (solo per cod. D0512), per collocazione wcbidet, in modo da raggiungere la distanza idonea per l'avvicinamento della seggiola a rotelle, completa di : struttura in acciaio zincato per il fissaggio wc a parete, rivestimento in ABS termoformato non ignifugo, vaso a terra con apertura frontale per funzione bidet, tubo flessibile di scarico Ø100.

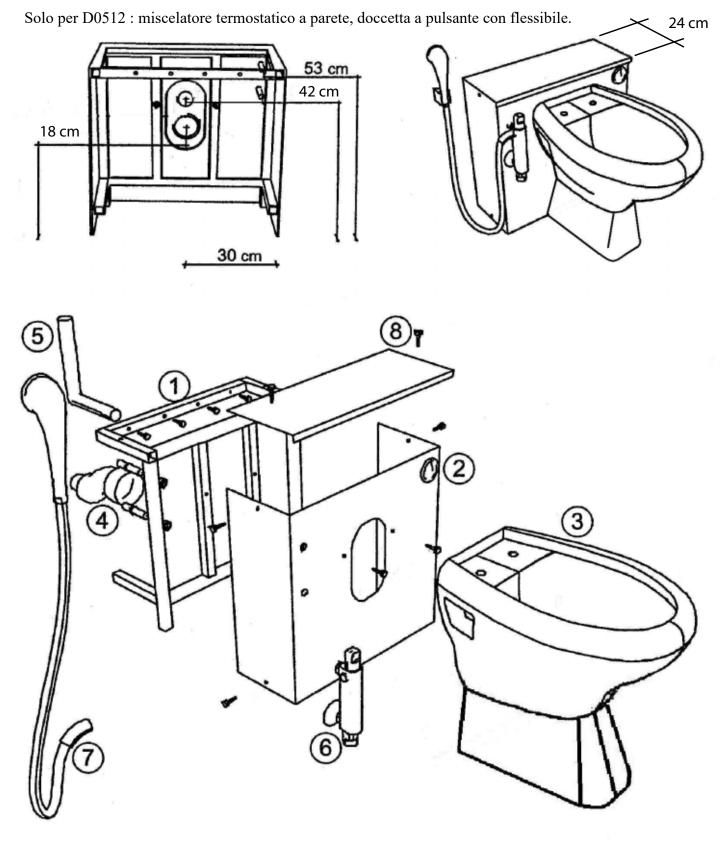




Goman S.r.l. - Via Maestri del lavoro, 8 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy Tel. +39 0376 671780 - Fax +39 0376 671286 www.goman.it - e-mail: info@goman.it



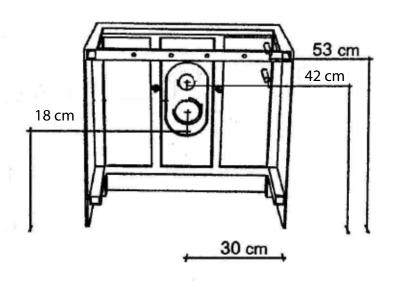

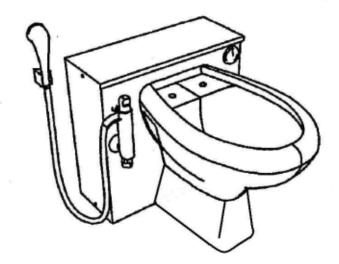

## ISTRUZIONI MONTAGGIO PARETE ATTREZZATA H. 60 (D0512 – D0513)

- 1. Fissare al muro la struttura portante inferiore posizionandola a terra e utilizzare viti/sistemi di fissaggio (non forniti) appropriati al tipo di parete.
- 2. Inserire la copertura e avvitarla alla struttura con le apposite viti fornite autofilettanti.
- 3. Ancorare il vaso a terra.
- 4. Collegare il tubo flessibile di scarico al vaso.
- 5. Montare il miscelatore termostatico sulla struttura portante con le riduzioni fornite (in caso di pareti senza miscelatore coprire i fori con gli appositi tappi in dotazione).
- 6. Collegare il condotto d'acqua della cassetta al vaso.
- 7. Avvitare il supporto della doccetta nella posizione desiderata.
- 8. Inserire il coperchio superiore e avvitarlo alla struttura portante con le apposite viti autofilettanti.