


Goman S.r.l. - Via Maestri del lavoro, 8 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy Tel. +39 0376 671780 - Fax +39 0376 671286 www.goman.it - e-mail: info@goman.it



SCHEDA TECNICA D0520 - D0521


Parete attrezzata H 120 cm., con miscelatore termostatico (solo per cod. D0520/01), per collocazione wc-bidet, in modo da raggiungere la distanza idonea per l'avvicinamento della seggiola a rotelle, completa di: struttura in acciaio zincato per il fissaggio wc a parete, rivestimento in ABS termoformato non ignifugo, vaso a terra con apertura frontale per funzione bidet, cassetta in ABS, meccanismo di scarico con comando pneumatico, tubo flessibile di scarico Ø100 mm. Solo per D0520/01: miscelatore termostatico a parete e doccetta a pulsante con flessibile cm.

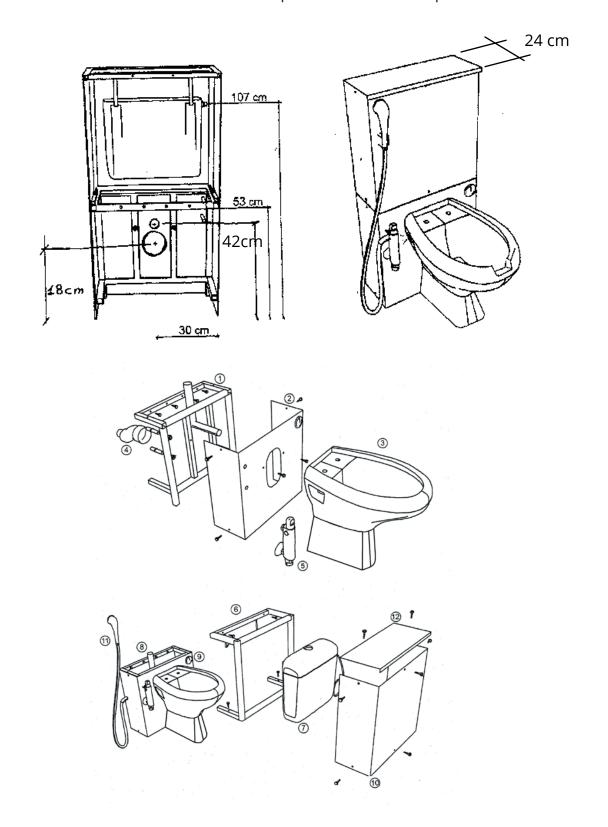




Goman S.r.l. - Via Maestri del lavoro, 8 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy Tel. +39 0376 671780 - Fax +39 0376 671286 www.goman.it - e-mail: info@goman.it



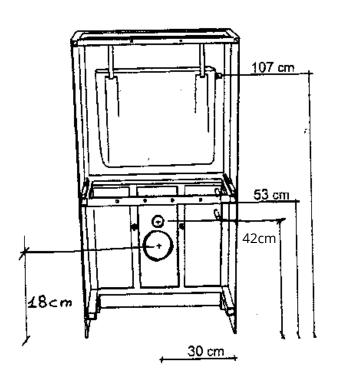

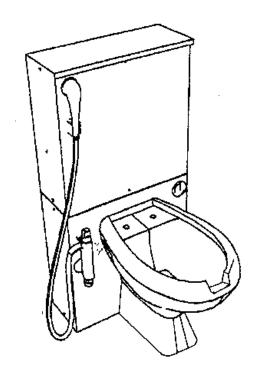

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PARETE ATTREZZATA H120 (D0520/01 - D0521/01)

- 1. Fissare al muro la struttura portante inferiore posizionandola a terra e utilizzare viti/sistemi di fissaggio (non forniti) appropriati al tipo di parete.
- 2. Inserire la copertura ed avvitarla alla struttura con le apposite viti autofilettanti fornite.
- 3. Ancorare il vaso a terra.
- 4. Collegare il tubo flessibile di scarico al vaso.
- 5. Per D0520/01: montare il miscelatore termostatico alla struttura portante utilizzando le riduzioni fornite.

Per D0521/01: chiudere i 2 fori con gli appositi tappi in dotazione.

- 6. Fissare la struttura portante superiore a quella inferiore utilizzando le viti da 6x70 mm. in dotazione e ancorarla a muro utilizzando viti/sistemi di fissaggio (non forniti) appropriati al tipo di parete.
- 7. Ancorare la cassetta di scarico agli appositi ganci.
- 8. Collegare il condotto d'acqua della cassetta al vaso.
- 9. Collegare il pulsante di scarico frontale utilizzando il relativo tubetto della cassetta.
- 10. Inserire la copertura superiore ed avvitarla alla struttura portante con le apposite viti autofilettanti fornite.
- 11. Avvitare il supporto della doccetta nella posizione desiderata.
- 12. Inserire il coperchio superiore e avvitarlo alla struttura portante con le apposite viti autofilettanti.